

Für den reibungslosen und effizienten Ablauf der Probenbearbeitung in unserem Labor ist das korrekte Anbringen der Barcodes auf den Probengefäßen wichtig. Nur so kann die Füllstandsmessung, welche essenziell für die Validität und Genauigkeit der resultierenden Analytik ist, optimal erfolgen.

Wir bitten Sie folgende Hinweise zu beachten:

- › Barcodeetikett immer auf das dafür vorgesehene Herstelleretikett auf dem Probengefäß platzieren
- › Ausschließlich senkrecht kleben

RICHTIGE ETIKETTIERUNG

- › Der Barcode klebt senkrecht auf dem Hersteller-Etikett.
- › Eine Seite des Röhrchens bleibt immer frei/unbeklebt.



FALSCH E ETIKETTIERUNG

- › Der Barcode klebt nicht auf dem Herstelleretikett.
- › Die Füllhöhe kann nicht bestimmt werden. Somit ist eine optimale automatisierte Probenbearbeitung nicht möglich.



IHRE FRAGEN BEANTWORTEN WIR GERN

Ria Groß | Cindy Hahn | aussendienst@aolabor.de | t. 0341 22179 516